

スーパースコープ

エレガンスをうまく使うポイント

1. レンズが緩く感じる場合

レンズの関節部分を下記のように保持して頂きますとしっかり固定します。



○



×



×

2. フレームの装着の仕方

フレームを両手で広げて顔面に装着致しますとフレームが必要以上に広がりすぎてフレームのヒンジの部分が壊れてしまいます。フレームの装着はおでこにフレームをあてがいおでこに沿って滑り込ますようにして装着してください。

3. 距離感の調整には

フレームを眼から離すことで距離感の調整ができます。鼻宛てパッドを鼻に宛てる角度を変えることで距離感が変わります。個人差によって距離感が変わりますので自分に合った距離感でお使いください。

以上

株式会社キクタニ